



Vejledning i udtagning af DNA ved mundskrab til retsgenetisk undersøgelse i faderskabssag

Blanketter og vejledninger

Prøveudtagningsstedet modtager en blanket A for hver prøve sammen med "Vejledning i brug af blanket A med henblik på udtagning af prøve til retsgenetisk undersøgelse i faderskabssag".

Prøver til retsgenetisk undersøgelse

Der udtages sædvanligvis 2 prøver fra hver sagspart. Disse prøver udtages som hovedregel med en uges mellemrum. Rekvirenten kan i særlige tilfælde bestemme, at prøverne udtages samme dag. I så fald må de 2 prøver ikke udtages af samme person, og prøverne skal mærkes med klokkeslæt.

Prøvemærkning

Ved udtagning af mundskrab fra sagspart anvendes et såkaldt FTA-kort. FTA-kortet mærkes med:

1. Dato for prøveudtagning.
2. Sagspartens (donors) CPR-nr.
3. Sagspartens (donors) fulde navn. Hvis et barn ikke er døbt/navngivet, anføres: Unavngivet dreng/ pige.
4. Sagsparten (donor) behøver ikke at underskrive FTA-kortet.
5. Prøveudtagningssted, eventuelt med stempel.
6. Prøveudtagers underskrift.

Ved udtagning af 2 prøver samme dag fra samme person skal FTA-kortene endvidere mærkes med klokkeslæt.

Oplysningerne kan evt. påføres med en printet label. Ukorrekt mærkede prøver kasseres af Retsgenetisk Afdeling.

Udtagning af mundskrab

Hvis en sagspart har modtaget knoglemarvs-transplantation udtages hårprøve sammen med mundskrab.

Kontakt Retsgenetisk Afdeling for oplysninger vedr. udtagelse af hårprøver.

Hvis en sagspart har modtaget blodtransfusion, skal der gå en uge inden prøveudtagning.

I forbindelse med udtagning af prøver og håndtering af FTA-kort skal der bæres handsker. Fremgangsmåde ved udtagning af mundskrab:

1. Kontroller at papiret under papirflappen er lyserødt. Hvis papiret i stedet er gulligt, kasseres kortet, og et nyt kort anvendes.
2. Bed evt. sagsparten om at skylle munden med vand.
3. Tag en mundskraber med skumgummihoved ud af indpakningen. Rør ikke ved skumgummihovedet, heller ikke med handsker.
4. Gnub omhyggeligt med den ene side af skumgummihovedet på indersiden af den ene kind i 20 sekunder. Gnub i 20 sekunder med den anden side af skumgummi-hovedet på indersiden af den anden kind.
5. Placer FTA-kortet på en ren, tør og flad overflade. Løft papirflappen på FTA-kortet, så man ser det lyserøde opsamlingspapir.
6. Pres først den ene side af skumgummihovedet og derefter den anden side af skumgummi-hovedet ned på papiret inden for den anførte cirkel. Uden at løfte skumgummihovedet presses omhyggeligt ved at vippe hovedet fra side til side, også helt på højkant, for at overføre så meget væde som muligt til papiret. Gnub ikke.
7. Smid mundskraberen ud. Mundskraberer må ikke tages i munden efter berøring med FTA-kortet.

Forsendelse

FTA-kortet lægges i det gennemsigtige etui. Der må kun lægges ét FTA-kort i hvert etui. Kuverten med FTA-kortet anbringes sammen med tilhørende blanket A i den gule forsendelseskuvert. Hver gul kuvert må kun indeholde ét FTA-kort med tilhørende blanket A. Flere gule kuverter kan dog samles i en større kuvert inden afsendelse.

Forsendelsen sendes til:

Retsgenetisk Afdeling
Retsmedicinsk Institut
Frederik V's Vej 11
2100 København Ø

Retsgenetisk Afdeling sørger for videreforsendelse af blanket A til rekvirenten.

Bestilling af FTA-kort

FTA-kort, mundskraberer samt kuverter kan rekvireres fra Retsgenetisk Afdeling via hjemmesiden: www.retsmedicin.ku.dk



Illustreret vejledning i udtagning af dna ved mundskrab til retsgenetisk undersøgelse i faderskabssag

A.

- Tag **handsker** på.
- Udfyld bagsiden af **FTA kortet** med blokbogstaver. Påsæt evt. printet label. Følgende oplysninger udfyldes:
 - Dato og evt. klokkeslæt (1)
 - Donors CPR nr. (2)
 - Donors navn (3)
 - Prøveudtagelsessted (5)
 - Prøveudtagers underskrift (6)
- Det er **IKKE** nødvendigt for donor at underskrive kortet (4)

1. Dato:	1. JANUAR 2010
2. Donors CPR nr.:	300205-2425
3. Donors navn:	JENS JENSEN
4. Donors underskrift:	—
5. Prøveudtagelsessted (navn eller stempel):	RETSGENETISK AFDELING Retsmedicinsk Institut Københavns Universitet Fridtsgade 11 2100 København Ø
6. Prøveudtagers underskrift:	


B.

- Tag **mundskraber** ud af den sterile indpakning. Vær omhyggelig med at skumgummihovedet ikke bliver berørt.




C.

- Gnub omhyggeligt skumgummihovedet mod indersiden af donors ene kind i store cirkler i **20 sekunder**.
- Skift kind og gnub igen omhyggeligt med skumgummihovedets anden side i store cirkler i **20 sekunder**.

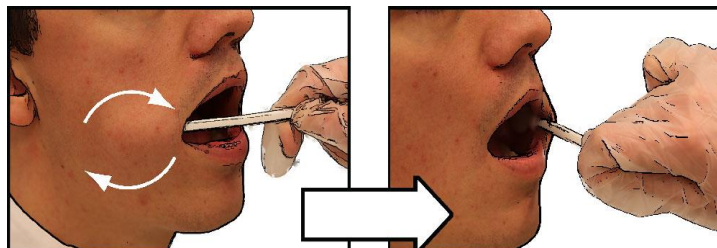

D.

- Pres, uden at gnubbe, skumgummihovedet ned på **FTA kortet** med den flade side inden for den afmærkede cirkel.
- Drej **mundskraber** en kvart omgang, og pres hårdt.
- Gentag til alle flader af **mundskraber** har berørt FTA kortet.
- Gentag ovenstående. Denne gang lukkes **FTA kortets** flap ned over **mundskraber** og der presses på flappen.
- Papiret skal have skiftet farve fra **lyserød** til **hvid***

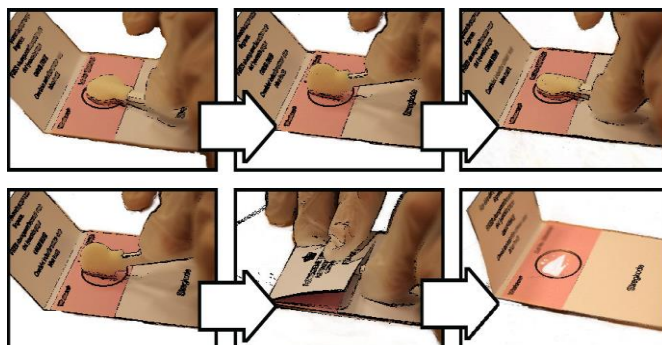

* Skifter papiret ikke farve anbefales det, at der laves et nyt mundskrab med et nyt kit efter at donor har skyllet munden med vand.