



Vejledning i udtagning af DNA ved mundskrab til retsgenetisk undersøgelse i familiesammenførings sag

Rekvirering af prøveudtagning

Prøveudtagningsstedet modtager en blanket for hver person, hvorfra der ønskes udtaget en prøve til retsgenetisk undersøgelse i familiesammenførings-sag. Blanketterne fremsendes fra den rekvirerende myndighed.

Udfyldelse af blanket

For hver prøve, der skal udtages, udfyldes den modtagne blanket med følgende oplysninger:

1. Prøvetagningssted samt navn på prøvetager
2. Prøvetagers underskrift
3. Underskrift for den, som har udfyldt blanket og evt. andre papirer
4. Dato for prøvetagning
5. Sagspartens navn og CPR-nr. Hvis sagsparten ikke har et CPR-nr., angives fødselsdato eller evt. asyl ID-nr.
6. Hvordan identiteten af donor er sikret (fx pas eller kørekort)

Sagsparten skal fotograferes i forbindelse med prøveudtagning. Fotoet hæftes på blanketten og indsendes sammen med prøven.

Prøvemærkning

Ved udtagning af mundskrab fra sagspart anvendes et såkaldt FTA-kort. FTA-kortet mærkes med:

1. Dato og klokkeslæt for prøveudtagning.
 2. Sagspartens (donors) fulde navn. Hvis et barn ikke er døbt/navngivet, anføres: Unavngivet dreng/ pige.
 3. Sagspartens (donors) CPR-nr., evt. fødselsdato eller asyl ID-nr.
 4. Prøveudtagers underskrift.
 5. Prøveudtagningssted, eventuelt med stempel.
- Oplysningerne kan evt. påføres med en printet label. Ukorrekt mærkede prøver kasseres af Retsgenetisk Afdeling.

Udtagning af mundskrab

Hvis en sagspart har modtaget knoglemarvs-transplantation udtages hårprøve sammen med mundskrab.

Kontakt Retsgenetisk Afdeling for oplysninger vedr. udtagelse af hårprøver.

I forbindelse med udtagning af prøver og håndtering af FTA-kort skal der bæres handsker.

Fremgangsmåde ved udtagning af mundskrab:

1. Kontroller at papiret under papirflappen er lyserødt. Hvis papiret i stedet er gulligt, kasseres kortet, og et nyt kort anvendes.
2. Bed evt. sagsparten om at skylle munden med vand.
3. Tag en mundskraber med skumgummihoved ud af indpakningen. Rør ikke ved skumgummihovedet, heller ikke med handsker.
4. Gnub omhyggeligt med den ene side af skumgummihovedet på indersiden af den ene kind i 20 sekunder. Gnub i 20 sekunder med den anden side af skumgummi-hovedet på indersiden af den anden kind.
5. Placer FTA-kortet på en ren, tør og flad overflade. Løft papirflappen på FTA-kortet, så man ser det lyserøde opsamlingspapir.
6. Pres først den ene side af skumgummihovedet og derefter den anden side af skumgummi-hovedet ned på papiret inden for den anførte cirkel. Uden at løfte skumgummihovedet presses omhyggeligt ved at vippe hovedet fra side til side, også helt på højkant, for at overføre så meget væde som muligt til papiret. Gnub ikke.
7. Smid mundskraberen ud. Mundskraberen må ikke tages i munden efter berøring med FTA-kortet.

Forsendelse

FTA-kortet lægges i det gennemsigtige etui. Der må kun lægges ét FTA-kort i hvert etui. Etuiet med FTA-kortet anbringes sammen med tilhørende blanket i den gule forsendelseskuvert. Hver gul kuvert må kun indeholde ét FTA-kort med tilhørende blanket. Flere gule kuverter kan dog samles i en større kuvert inden afsendelse.

Forsendelsen sendes til:

Retsgenetisk Afdeling
Retsmedicinsk Institut
Frederik V's Vej 11
2100 København Ø

Retsgenetisk Afdeling sørger for videreforsendelse af blanket til rekvirenten.

Bestilling af Mundskrabskit

Kit kan kun bestilles af den rekvirerende myndighed (Udlændingestyrelsen) via Retsgenetisk Afdelings hjemmeside: <https://retsmedicin.ku.dk/>



Illustreret vejledning i udtagning af DNA ved mundkrab til retsgenetisk undersøgelse i familiesammenførings sag

A.

- Tag **mundbind** og **handsker** på.
- Udfyld **FTA-kortet** med blok- bogstaver. Følgende oplysninger udfyldes:
 - Dato og klokkeslæt (1)
 - Donors navn (2)
 - Donors CPR nr. (3)
 - Prøveudtagers underskrift (4)
 - Prøveudtagningssted (5)

B.

- Tag **mundskraber** ud af den sterile indpakning. Vær omhyggelig med at skumgummihovedet ikke bliver berørt.




C.

- Gnub omhyggeligt skumgummihovedet mod indersiden af donors ene kind i store cirkler i **20 sekunder**.
- Skift kind og gnub igen omhyggeligt med skumgummihovedets anden side i store cirkler i **20 sekunder**.



D.

- Pres, uden at gnubbe, skumgummihovedet ned på **FTA kortet** med den flade side inden for den afmærkede cirkel.
- Drej **mundskraber** en kvart omgang, og pres hårdt.
- Gentag til alle flader af **mundskraber** har berørt FTA kortet.
- Gentag ovenstående. Denne gang lukkes **FTA kortets** flap ned over **mundskraber** og der presses på flappen.
- Papiret skal have skiftet farve fra **lyserød** til **hvid***.

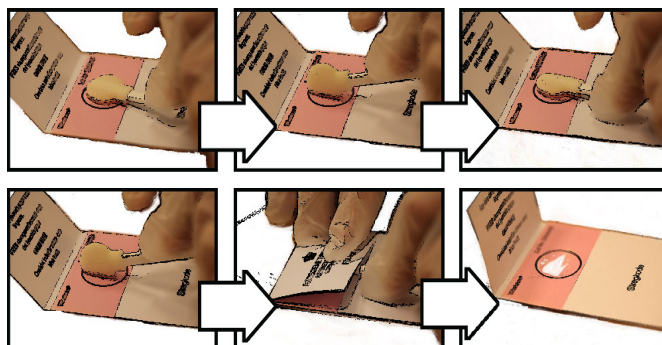

*Skifter papiret ikke farve anbefales det, at der laves et nyt mundkrab med et nyt kit efter at donor har skyllet munden med vand.